

Le saviez-vous...

- Le cancer est la cause principale de décès chez les chiens âgés.
- Près de 50 % des chiens âgés de plus de 10 ans développent un cancer.
- Les tumeurs cutanées représentent 1/3 de toutes les tumeurs chez les chiens.
- 30 % des chiens ont plus d'une grosseur.
- Certaines races de chiens sont plus sujettes au cancer que d'autres, et ce dès le plus jeune âge.

Dépistage du cancer

Le dépistage du cancer de la peau est important chez l'homme - comment les chiens sont-ils affectés

Il existe deux grands types de tumeurs chez le chien :

- Maligne (cancéreuse)
- Bénigne (non cancéreuse)

Heureusement, moins de la moitié des grosseurs chez les chiens sont cancéreuses.

La plupart d'entre elles peuvent être traitées avec succès si elles sont détectées à un stade précoce.

Le diagnostic précoce est l'étape la plus importante et la plus efficace du traitement du cancer

- Cela ne doit pas prendre beaucoup de temps.
- Cela n'a pas besoin d'être invasive.
- Cela peut apporter un soulagement immédiat à vos soucis.
- Cela peut éviter des traitements coûteux.
- Cela peut permettre à votre chien de poursuivre une vie longue et heureuse avec une grande qualité.



Comment puis-je savoir si mon chien est atteint d'un cancer ?

- Les chiens ne peuvent pas simplement vous dire ce qu'ils ressentent d'une manière facile à comprendre.
- Dans le cadre de leur instinct de survie, les chiens peuvent dissimuler les signes d'une maladie à un stade précoce, ce qui la rend difficile à identifier.
- C'est pourquoi une maladie peut être déjà très avancée avant que vous ne découvriez des signes perceptibles ou reconnaissables.
- Les signes précurseurs peuvent être détectés par votre vétérinaire lors d'un examen physique.

Le dépistage du cancer commence à la maison

Certaines cliniques proposent des examens préventifs, mais vous pouvez examiner votre chien vous-même pour détecter d'éventuels signes et observer les symptômes suspects:

- Caressez et palpez votre chien régulièrement (c'est aussi une bonne préparation à l'examen clinique).
- Recherchez des grosseurs sur ou sous la peau, des indurations, des bosses, des ampoules, des plaies cutanées et des blessures nouvelles ou passées inaperçues.
- Votre chien présente-t-il des plaies qui ne cicatrisent pas ?
- Votre chien se gratte-t-il ou se lèche-t-il fréquemment à certains endroits ?
- Votre chien présente-t-il des changements de comportement ou des problèmes d'exercice ?
- Refuse-t-il d'être caressé à certains endroits ou montre-t-il des signes de douleur ?
- Votre chien est-il de plus en plus fatigué, mange-t-il mal ou perd-il beaucoup de poids ?

Que devez-vous faire ?

Si vous remarquez quelque chose de suspect ou si vous trouvez une grosseurs sur ou sous la peau: notez le jour, l'endroit où se trouve la grosseur, la taille et prenez une photo.

Consultez votre vétérinaire dès que possible, si la grosseur:

- a un diamètre d'un centimètre ou plus (la taille d'un petit pois) et/ou
- est présente depuis plus d'un mois et/ou
- a changé de taille, de forme, de couleur ou s'est enflammée.






HT Vista

Quel est l'avantage de choisir un premier dépistage avec HT Vista® ?

- La procédure HT Vista® est non invasive, non douloureuse et n'effraie pas votre chien.
- Il s'agit d'une technologie innovante basée sur des processus thermiques et l'intelligence artificielle.
- HT Vista® est un système breveté et validé qui fait l'objet d'un développement continu grâce à des études en cours.
- L'examen ne prend que quelques minutes.
- Plusieurs grosseurs peuvent être examinées en même temps.
- Le cancer peut être exclu sur place chez le vétérinaire.

Comment fonctionne l'examen avec HT Vista® ?

1. Votre chien et la (les) grosseur(s) seront enregistrés dans HT Vista®.
2. La/les zone(s) suspecte(s) doit/doivent être tondre.
3. Le processus de scannage réchauffe en douceur le tissu d'environ 6 degrés pendant 10 secondes, puis le laisse refroidir pendant 30 secondes sans déranger votre chien.
4. Tous les signaux sont enregistrés par une caméra optique infrarouge et un capteur thermique.
5. L'algorithme HT Vista® AI analyse les signaux et détecte toute anomalie.
6. Le résultat est présenté sur une échelle de 1 à 10.

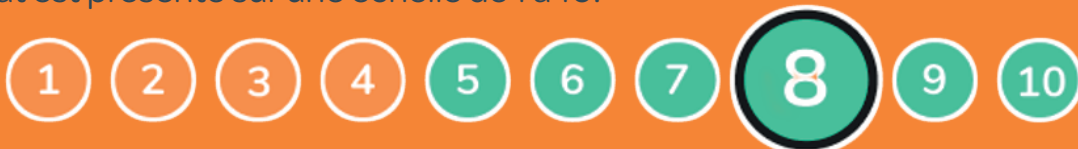

Un résultat de 5 à 10 signifie avec 98% de certitude que le tissu n'est pas malin.

Un résultat de 1 à 4 signifie que des examens complémentaires sont nécessaires.

Le seuil pour obtenir un résultat négatif de 5 à 10 est très élevé.

Ainsi, avec un résultat de 1 à 4, il y a de bonnes chances que le tissu soit finalement bénin.

EVIDENCE

HT Vista® a été testé sur des MILLIERS de chiens.





HTVista



Exclure simplement le cancer



Non invasif
et indolore



Sur place -
en quelques
minutes



Sans stress
Facile à comprendre



Procédure
validée

HTVista est le premier **dispositif médical non invasif** qui permet à vos professionnels de la santé de défenir les grosseurs sous-cutanées et dermiques comme bénignes ou malignes, sur place et en seulement quelques minutes.

Le diagnostic précoce du cancer est la clé pour sauver la vie de nos animaux de compagnie et HT Vista® est là pour nous aider à le faire.

Prenez rendez-vous avec HT Vista® maintenant
Vous y trouverez des vétérinaires avec HT Vista®:
aveto.ch/ht-vista-locations



 **aveto**

W: aveto.ch
M: info@aveto.com
T: +41 44 500 3434

 **HTVET**